

## NOTICE D'UTILISATION

Vous avez entre vos mains notre kit SANBUÉ<sup>®</sup> avec sa bande de JERSEY à coudre pour les masques tissus et une lotion désinfectante multi-surfaces. Ce dispositif a été testé et approuvé pendant plusieurs semaines de tests en milieu scolaire, médical, industriel et tertiaire.



### Nos recommandations d'utilisation :

Pour prendre un SANBUÉ<sup>®</sup>, décrocher la bande de jersey qui entoure le kit. Ne pas enlever la bande d'autoagrippant.



Après vous être lavé les mains, désinfecter la surface lisse du SANBUÉ<sup>®</sup> à l'aide de la lotion.



Fixez votre SANBUÉ<sup>®</sup> sur le haut du masque, sur la face intérieure en appuyant légèrement sur le SANBUÉ<sup>®</sup>.



Pliez légèrement le SANBUÉ<sup>®</sup> au centre du masque pour faciliter sa mise en place sur le visage.



Posez votre masque et ajuster le à vos pommettes.



## Nos recommandations d'utilisation :

Enlevez votre masque par les élastiques.

Saisissez le SANBUÉ® avec précaution par un de ses cotés pour le retirer.




Laissez-le en forme pour le nettoyer.


Utilisez la lotion fournie.



Lavez-vous les mains avant de prendre un nouveau masque. Positionner le SANBUÉ® formé sur le masque en veillant à ce qu'il soit bien accroché sur le bord du masque.

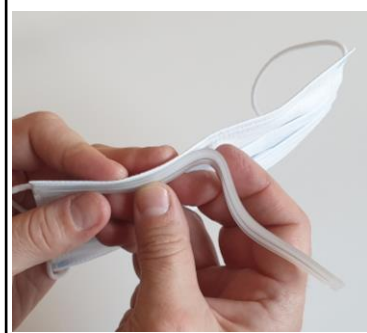

Pour les masques en tissu et afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous recommandons de coudre une partie du jersey fournie dans le kit.

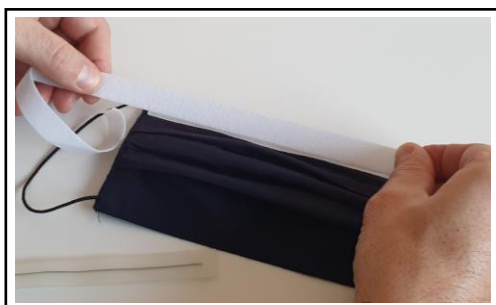

ATTENTION : Une utilisation inappropriée engendrera inévitablement une détérioration prématurée de votre dispositif. Sa durabilité dépend grandement de son utilisation.

N'utilisez pas un SANBUÉ® abimé.

